

ACURHYAL

EL PRIMER Y **ÚNICO BIOESTIMULADOR** FORMULADO CON **ÁCIDO HIALURÓNICO DE ULTRA BAJO PESO MOLECULAR Y AMINOÁCIDOS**, DISEÑADO PARA UNA BIOESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA.



Acerca de Acurhyal

Acurhyal es un dispositivo médico inyectable basado en una forma única de ácido hialurónico con un peso molecular ultra preciso y aminoácidos para estimular la proliferación celular y la producción de colágeno.

A diferencia de la mayoría de los estimuladores de colágeno (PLLA, PLA, PDRN o hidroxiapatita cálcica), Acurhyal es totalmente absorbible, natural, eficaz y seguro.

- ✓ Puede utilizarse en zonas sensibles.
- ✓ Técnica de inyección superficial.
- ✓ Totalmente absorbible: sin acumulación en la dermis.
- ✓ Respaldo por la ciencia y la investigación clínica.

Elegir Acurhyal

- Componentes biocompatibles y con menor probabilidad de causar efectos adversos. Imitan sustancias ya presentes en el organismo.
- Resultados de aspecto natural que preservan la expresión facial y la armonía.
- Solución regenerativa mínimamente invasiva que se alinea con el bienestar y la belleza natural.




Ácido hialurónico ultraligero
diseñado con precisión (15,2 kDa).



Bioestimulación del colágeno
segura y eficaz a través de
receptores clave de la piel.



Respaldo por evidencia clínica: +200
% de densidad de colágeno y +27 % de
grosor dérmico en 60 días.

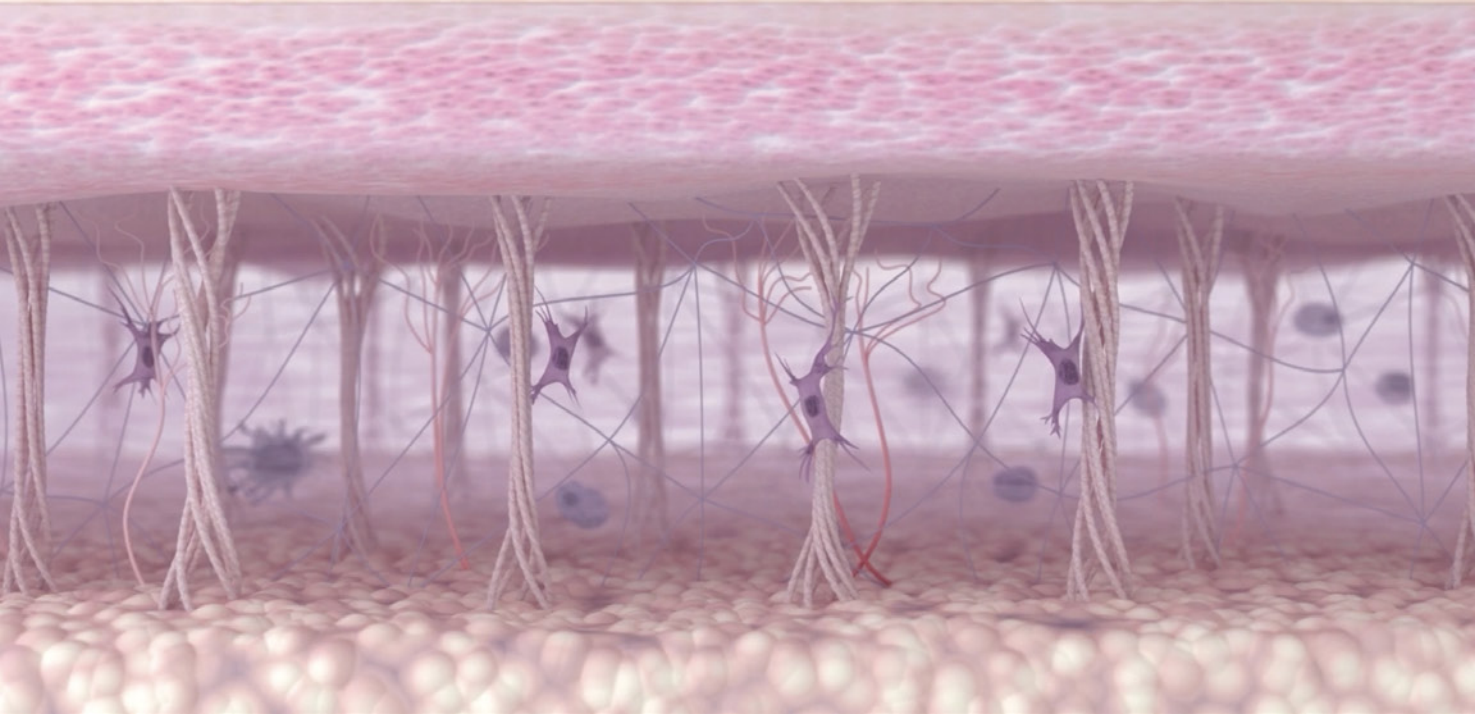

Zonas de tratamiento



Rostro



Zona periorbitaria



Cuello y escote



Manos



Cuero cabelludo
(revitalización capilar)



Cuerpo

Resultados

- ✓ Mayor firmeza de la piel, con arrugas y líneas finas menos visibles.
- ✓ Mayor retención de agua en la dermis y más hidratación cutánea.
- ✓ Reducción de las ojeras.
- ✓ Textura de la piel más suave.
- ✓ Resultados desde la primera sesión, con resultados óptimos tras 6 tratamientos.

¿En qué se diferencia de PLLA, PLA y otros estimuladores sintéticos?

Característica	ACURHYAL	PLLA / PLA / CAHA
Origen	Biocompatible (AH + aminoácidos)	Sintético / Semisintético
Mecanismo	Soporte directo del colágeno	Fuerte reacción inflamatoria
Seguridad	Sin fibrosis, granulomas ni nódulos	Posible fibrosis, nódulos y sobrecorrección
Zonas	Seguro incluso para ojos y cuello	Limitado a zonas con mayor tejido graso
Degradación	Totalmente absorbible	Posibles residuos y acumulación

¿Cómo es el tratamiento?

Cada protocolo es mínimamente invasivo y prácticamente indoloro. Se inyecta una pequeña cantidad de producto en puntos precisos mediante microagujas, sin tiempo de inactividad ni marcas visibles.

Protocolo inicial:

- ✓ 4 sesiones (1 por semana durante 4 semanas)
- ✓ Opcionalmente seguido de 2 sesiones cada 2 semanas
- ✓ Los resultados son óptimos después de 3 a 6 sesiones

Mantenimiento:

- ✓ 1 sesión cada 3 a 6 meses, según el estado de la piel y los objetivos.

ACURHYAL® LIFT



Acurhyal Lift presenta una fórmula diseñada para activar una **bioestimulación fisiológica y no inflamatoria**.

Su ácido hialurónico de **ultra bajo peso molecular** actúa como la señal biológica, mientras que su **complejo de aminoácidos** funciona como el sustrato necesario para la producción de **colágeno tipo III**.

A esto se suma la **colina**, un activo diferenciador que **estimula la actividad de los fibroblastos** y contribuye a mejorar el tono muscular.

Diseñado para tratamientos faciales y corporales, **Acurhyal Lift** es ideal para abordar **reafirmación corporal, bolsas bajo los ojos, deshidratación facial, efecto lifting, cicatrices y estrías**.

Antes



Después



* 6 tratamientos durante un período de 60 días (4 sesiones durante 4 semanas y 2 sesiones cada 2 semanas)
– Resultados proporcionados por un experto de Melis.

Antes




Después



* 6 tratamientos durante un período de 60 días (4 sesiones durante 4 semanas y 2 sesiones cada 2 semanas)
Resultados proporcionados por un experto de Melis.

Antes

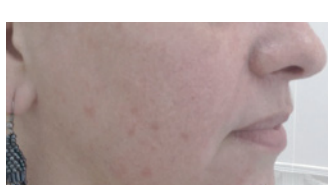

Después



* 6 tratamientos durante un período de 60 días (4 sesiones durante 4 semanas y 2 sesiones cada 2 semanas) – Resultados proporcionados por un experto de Melis.

¿Cuánto duran los resultados?

Los estudios clínicos muestran que las mejoras en la piel, incluido el aumento de colágeno y la mejora de la elasticidad, pueden durar de 6 a 9 meses, especialmente con mantenimiento.

"Con Acurhyal, el rejuvenecimiento es gradual, equilibrado y de aspecto natural. Te verás fresco/a, no relleno/a ni rígido/a."

Consulta hoy con tu especialista sobre un plan de tratamiento personalizado con Acurhyal.

TÉCNICA PAPULAR - PASO A PASO

1. Preparación de la piel

Limpia y desinfecta minuciosamente la zona de tratamiento.

2. Inyección

Utilizando una aguja fina (30G–32G), inyecta de forma muy superficial con un ángulo de 10–15°. Deposita una pequeña cantidad (0,01–0,05 ml) por punto para formar una pápula visible (pequeño bulto). Espacia cada inyección aproximadamente entre 0,5 y 1 cm.

3. Cuidados postratamiento

No masajear la zona: las pápulas se absorberán de forma natural. Aconseja al paciente evitar el sol, el maquillaje y los productos agresivos durante 24–48 horas.

Protocolo facial 1:

- Técnica papular: difusión uniforme para hidratación y estimulación.
- Inyecciones cada 1 cm en el rostro y el cuello.
- 5 ml – 0,1 ml por punto – Aproximadamente 50 inyecciones.
- Técnica de inyección mínimamente invasiva.
- Puede combinarse con el protocolo 4.
- Frecuencia recomendada: 4 sesiones semanales, seguidas de mantenimiento cada 3 a 6 meses.



Protocolo facial 2:

- Técnica intramuscular: para un efecto lifting inmediato.
- Inyecciones en los músculos.
- 2,5 ml – 0,25 ml por punto – 8 inyecciones.
- Técnica de inyección mínimamente invasiva.
- Frecuencia recomendada: 4 sesiones semanales, seguidas de mantenimiento cada 3 a 6 meses.



Protocolo corporal:

- Técnica intramuscular: para un efecto lifting inmediato.
- Inyecciones en los músculos.
- 5 ml – 0,25 ml por punto – 8 inyecciones por lado.
- Técnica de inyección mínimamente invasiva.
- Frecuencia recomendada: 4 sesiones semanales, seguidas de mantenimiento cada 3 a 6 meses.



NOTAS PARA EL PROFESIONAL


- Evalúa siempre el nivel de hidratación de la piel antes del tratamiento utilizando herramientas como la corneometría.
- Combina con sérums antioxidantes o mascarillas postratamiento para maximizar los resultados y reducir el tiempo de recuperación.
- Almacena los productos entre 2 °C y 25 °C. No congelar.



DM Class III | Certificación MDR Europea | Certificación ISP

FUSION MESO

AESTHETIC MEDICINE FORMULATIONS

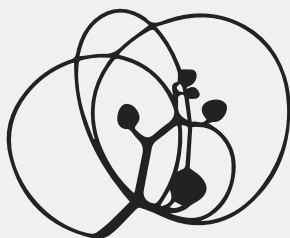

ORQUÍDEA
D E R M A M E D

FORMULACIONES DE MEDICINA ESTÉTICA

Instagram @fusionmeso_official

Instagram @orquideadermamed

Globe icon orquideadermamed.cl